

VITA Zahnfabrik · H. Rauter GmbH & Co. KG · D-7880 Bad Säckingen  
Téléphone: 07761-5620 · Télex: 792 334 vita d · Téléfax: 07761-6389

**VITA**


**La livraison comprend:**  
1 four VITA Inceramat  
1 socle de cuisson  
1 câble électrique  
1 pince  
1 mode d'emploi


**Données électriques:**  
220 Volt 50 Hz  
puissance absorbée:  
max. 1,5 KW  
Température du corps de  
chauffe:  
max. 1200°C

**Données techniques:**  
Dimensions et poids:  
hauteur: 595 mm  
largeur: 370 mm  
profondeur: 410 mm  
poids: 24,1 kg  
Corps de chauffe / dimensions:  
diamètre: 110 mm  
hauteur: 80 mm


# VITA INCERAMAT

## Mode d'emploi

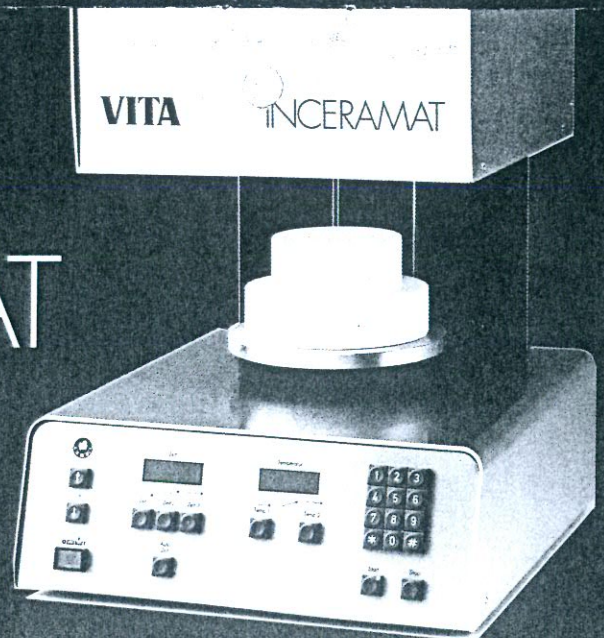

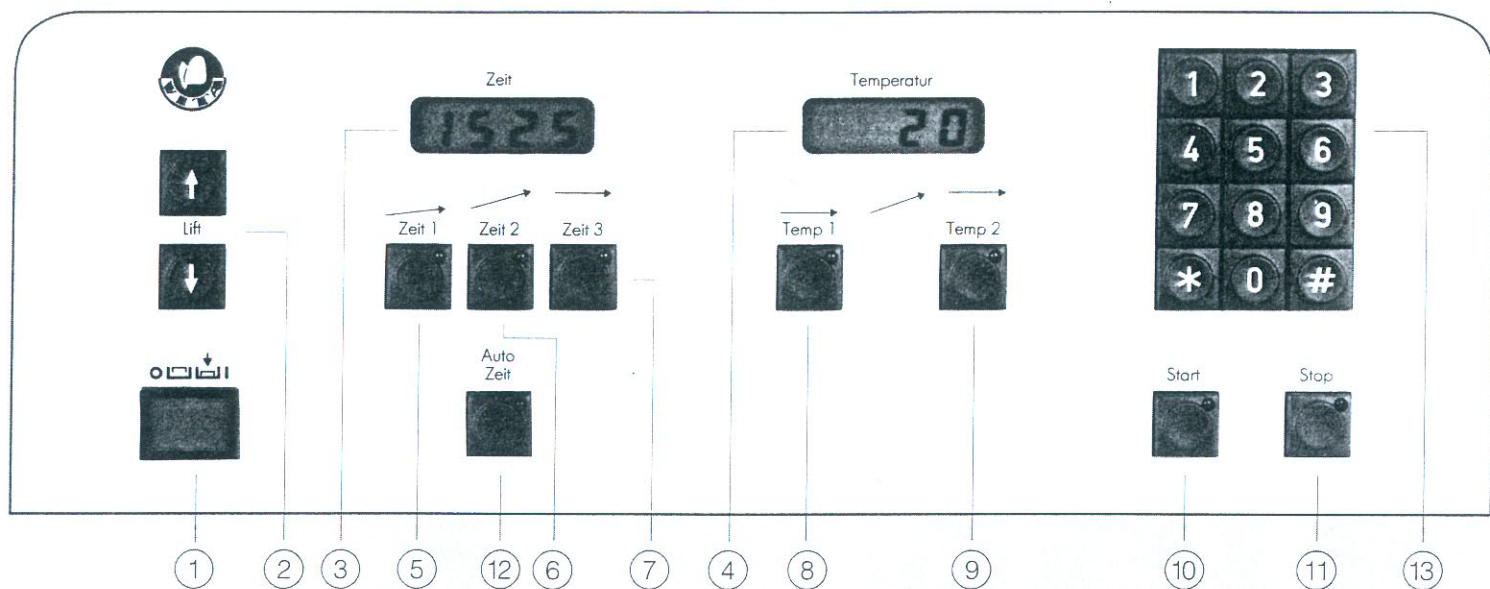

- ① Interrupteur arrêt/marche
- ② Touche lift montée/descente
- ③ Affichage lumineux pour le numéro de programme, l'heure du jour, l'heure de mise en marche du fonctionnement automatique ainsi que pour les temps de cuisson.
- ④ Affichage lumineux de la température programmée et de la température réelle.
- ⑤ Voyant témoin pour la durée 1.
- ⑥ Voyant témoin pour la durée 2.
- ⑦ Voyant témoin pour la durée 3.
- ⑧ Touche pour la température - valeur 1: séchage
- ⑨ Touche pour la température - valeur 2: température finale
- ⑩ Touche de lancement du programme
- ⑪ Touche d'arrêt du programme
- ⑫ Touche de fonctionnement automatique
- ⑬ Clavier d'entrée des données.

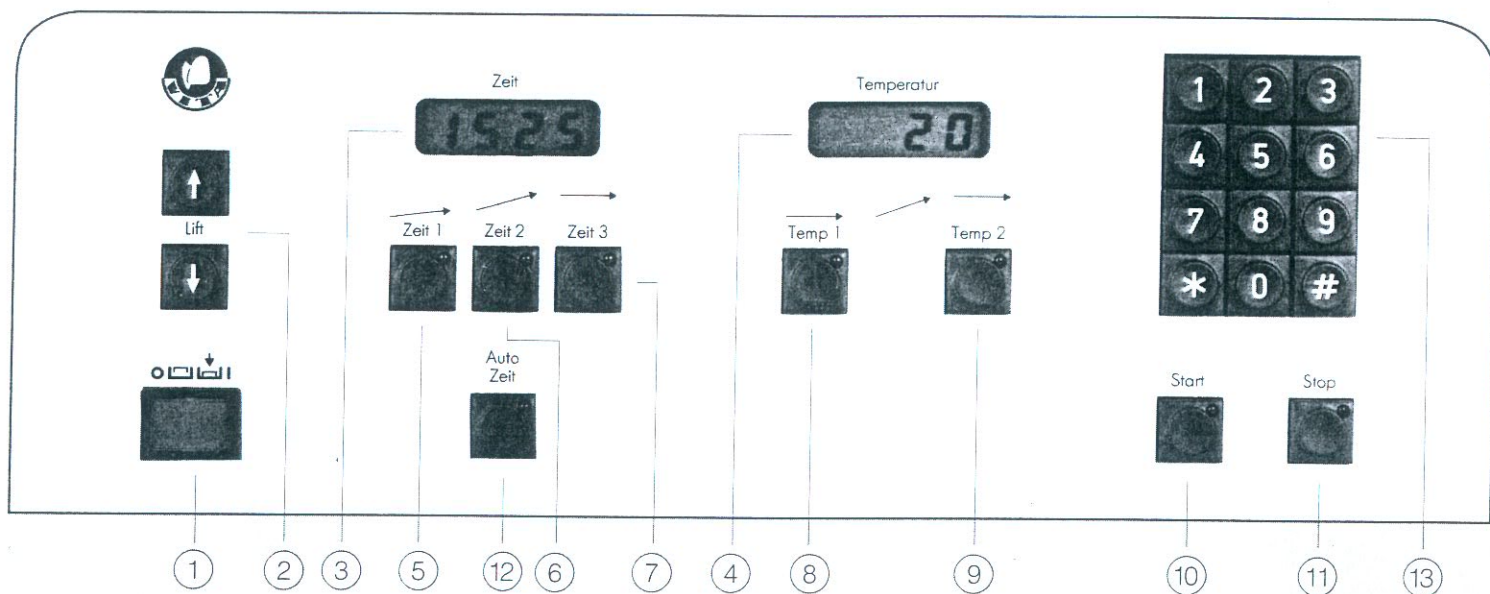


## Mise en marche

1. L'appareil doit être placé à au moins 25 cm d'une paroi ou d'un mur avoisinant.
2. Brancher le câble de raccordement fourni avec le four.
3. Mettre en marche en appuyant sur l'interrupteur EIN/AUS (1). L'indicateur de température (4) mentionne la température du moufle. L'indicateur de temps (3) mentionne le n° de programme.
4. Faire descendre le lift en appuyant sur la touche (2) et déposer le socle de cuisson sur le plateau du lift. L'appareil est prêt à fonctionner.

## Réglage de la montre

1. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur (1).
2. Appuyer sur la touche verte du clavier (13) jusqu'à ce que l'indicateur de temps (3) affiche des tirets.
3. Appuyer sur la touche "1" du clavier (13) jusqu'à ce que l'indicateur de temps clignote.
4. Programmer l'heure à l'aide des touches du clavier (13) (heure/mn).
5. Confirmer l'heure programmée à l'aide de la touche verte du clavier (13).

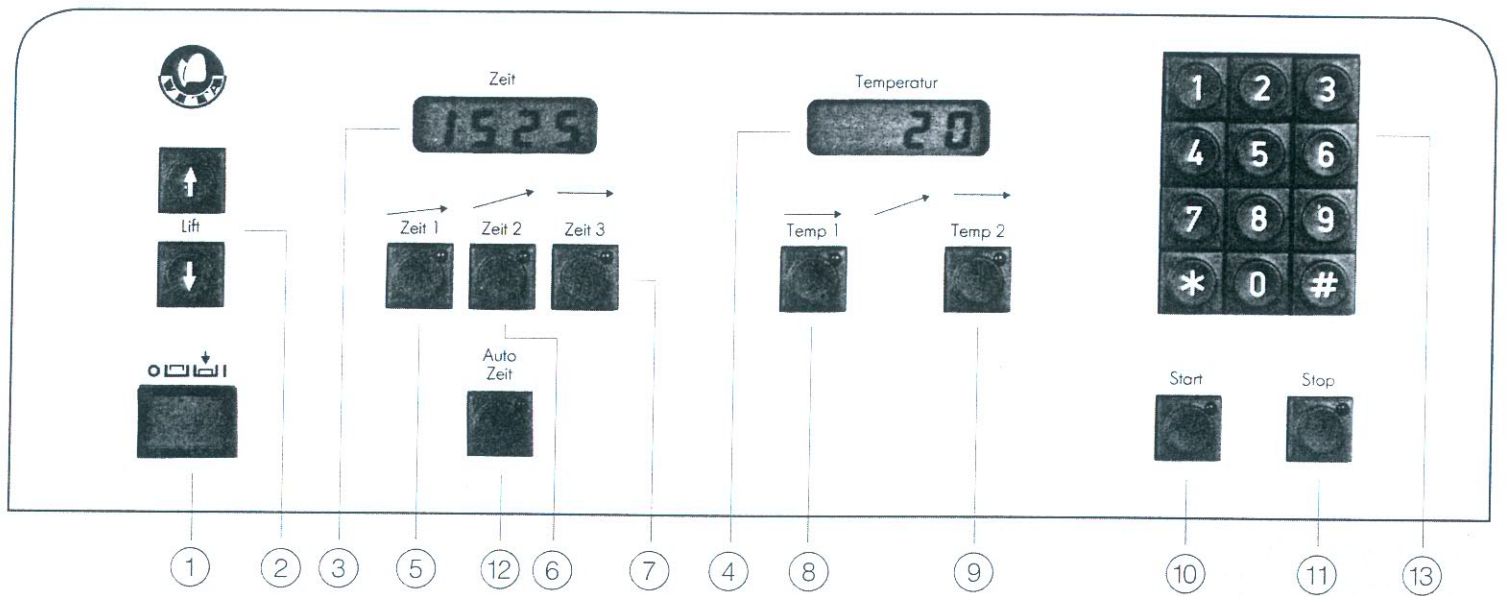

## Sélection du programme


1. Mettre en marche l'appareil avec l'interrupteur (1).
2. Choisir un numéro de programme en utilisant les touches du clavier (13), de 0 à 9.
3. On peut appeler à l'écran lumineux les différentes valeurs de durée du programme,

## Vérification des données du programme

- en appuyant sur les touches de durée 1 à 3 - (5), (6), (7).
4. On peut appeler à l'écran lumineux les différentes valeurs de température du programme, en appuyant sur les touches de température 1 et 2 - (8), (9).

### Attention

Pour vérifier une valeur de température ou de durée, appuyer brièvement sur la touche correspondante. La valeur sera affichée pendant 3 secondes. En appuyant plus longuement sur la touche, la valeur clignote à l'affichage. Pour supprimer le clignotement, appuyer sur la touche verte du clavier (13).

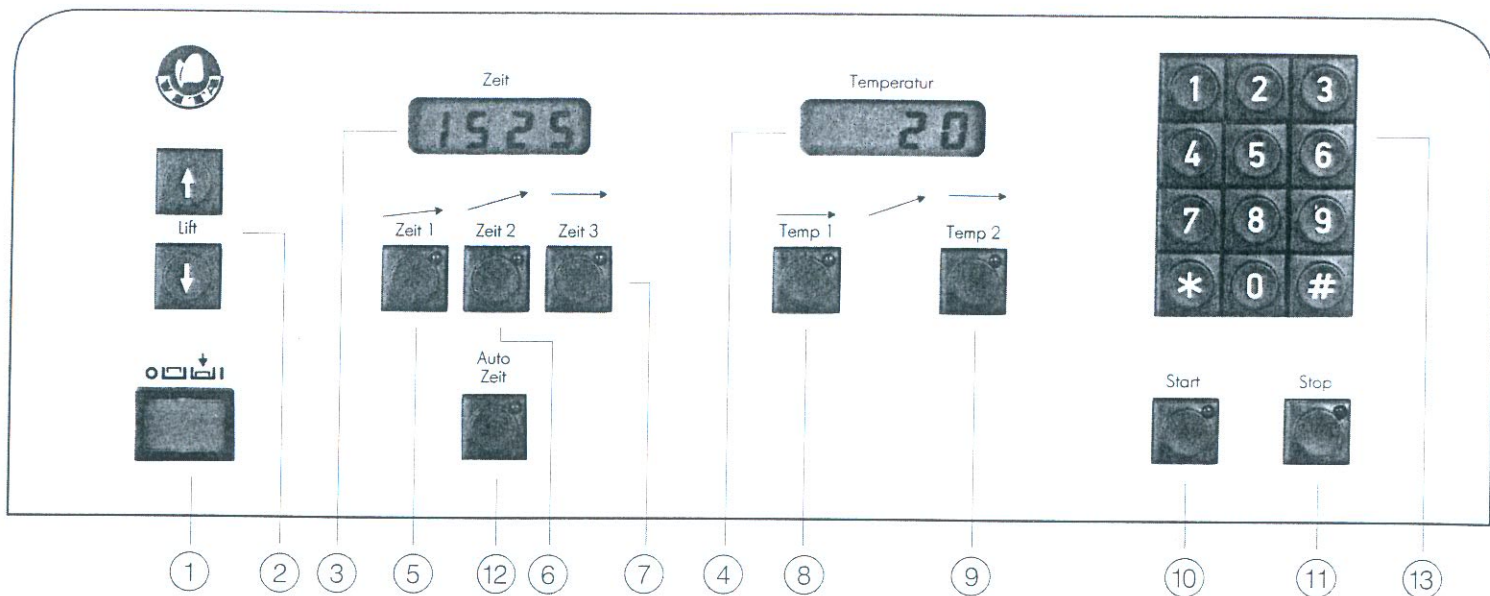

## Modification ou Changement des valeurs de durée et de temperature

Toutes les valeurs contenues dans les programmes peuvent être changées comme suit:

1. Sélectionner le programme désiré à l'aide des touches du clavier (13) de 0 à 9.
2. Appuyer en continu sur la touche correspondant à la valeur à modifier (pour les valeurs de durée (5), (6), (7), pour les valeurs de température (8), (9) jusqu'à ce que l'affichage clignote.

3. Programmer la nouvelle valeur à l'aide des touches du clavier (13).

Les valeurs programmables sont les suivantes:

Durée 1: 0 à 6 heures

Durée 2: 0 à 6 heures

Durée 3: 0 à 6 heures

Température 1: 80 à 300°C

Température 2: maximum 1200°C


4. Confirmer la nouvelle valeur en appuyant sur la touche verte du clavier (13).

### Attention

EN cas d'entrée erronée, l'affichage (3) indique erreur.

L'affichage d'erreur s'annule en appuyant sur la touche stop (11) (voir codes d'erreurs).

## Modification ou changement des valeurs

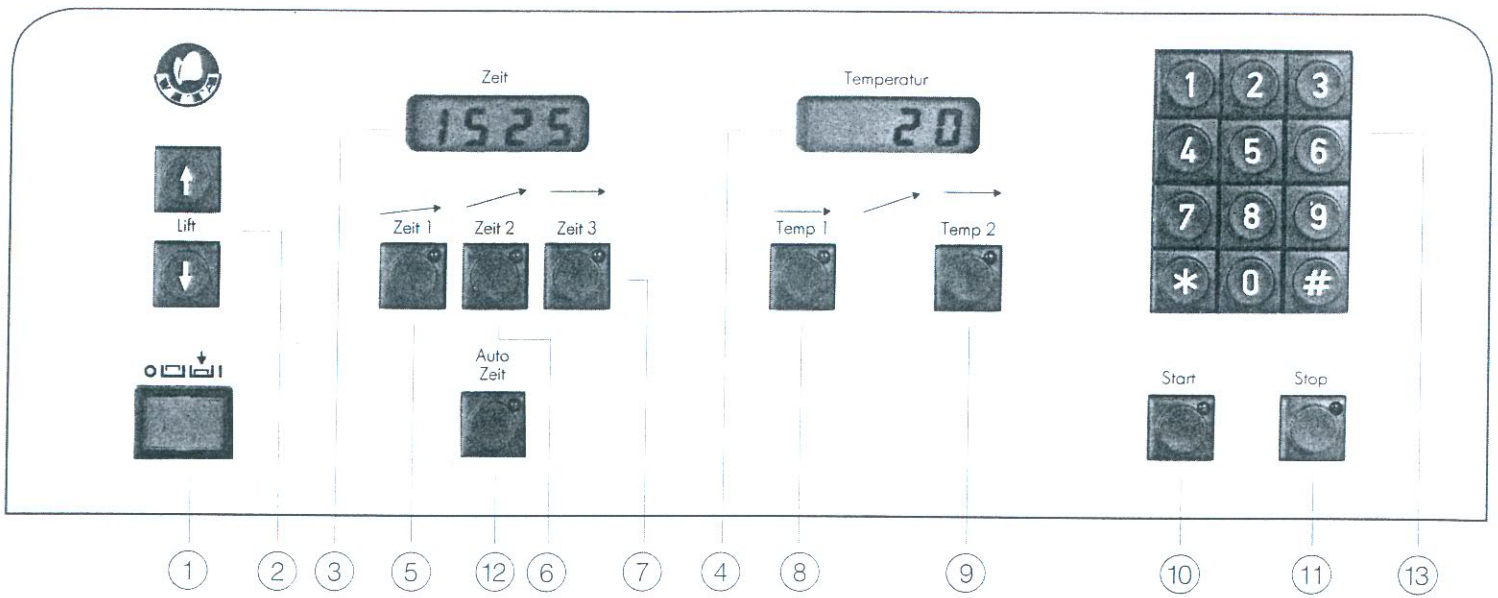


### Mise en route du programme

1. Choisir le n° de programme sur le clavier (13).
2. Vérifier les valeurs de température et de durée.
3. Déposer la pièce à cuire sur le socle de cuisson et l'introduire dans le moufle en appuyant sur la touche de lift (2).
4. Appuyer sur la touche START (10), le programme démarre. La diode verte de la touche START (10) est allumée. La diode rouge de la touche STOP (11) clignote. La diode jaune de la zone de durée en opération clignote ou est allumée. La diode jaune de la montée de température en opération est allumée.

#### Remarques:

Lors du départ d'un programme, la diode jaune de la zone de durée 1 peut clignoter quelques minutes. La durée de cuisson réelle n'est décomptée que lorsque la diode est allumée en fixe et que la durée programmée est affichée à l'indicateur de temps (3).

### Mise en route du programme

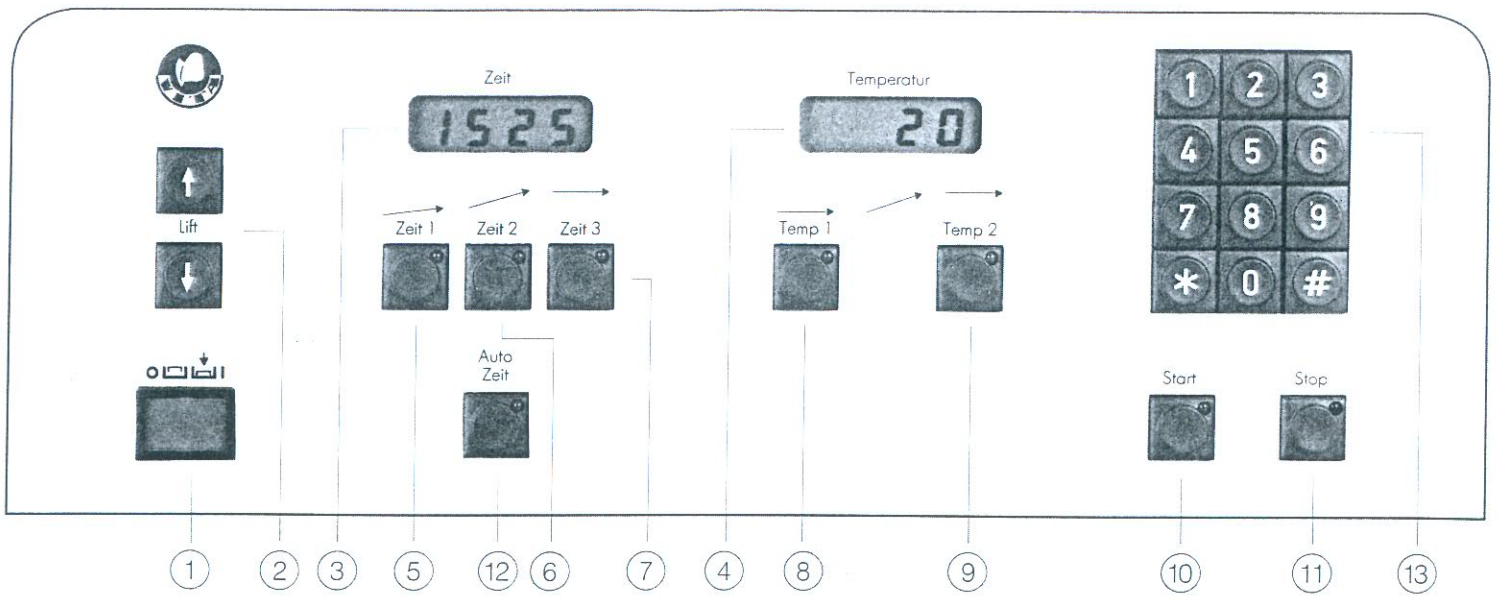

## Mise en route automatique

L'appareil en état de marche et en ayant sélectionné un n° de programme, il est possible de choisir une heure de mise en route d'un programme.

### Vérification de l'heure:

Appuyer brièvement sur la touche AUTO ZEIT (12) : l'indicateur lumineux (3) indique l'heure automatique en mémoire.

### Modification de l'heure:

Appuyer sur la touche AUTO ZEIT (12) jusqu'à ce que l'indicateur de durée (3) clignote. Programmer l'heure voulue en utilisant les touches du clavier (13) et confirmer en appuyant sur la touche verte.

### Programmation de l'heure de mise en route automatique:


Appuyer sur la touche AUTO ZEIT (12) jusqu'à ce que l'indicateur de temps (3) clignote. Appuyer sur la touche START (10).

L'indicateur (3) indique l'heure. La diode rouge de la touche STOP (11) clignote. La diode jaune de la touche (12) est allumée. Le programme se mettra en route à l'heure sélectionnée.

### Annulation de l'heure:

Appuyer sur la touche STOP (11).

Mise en route automatique

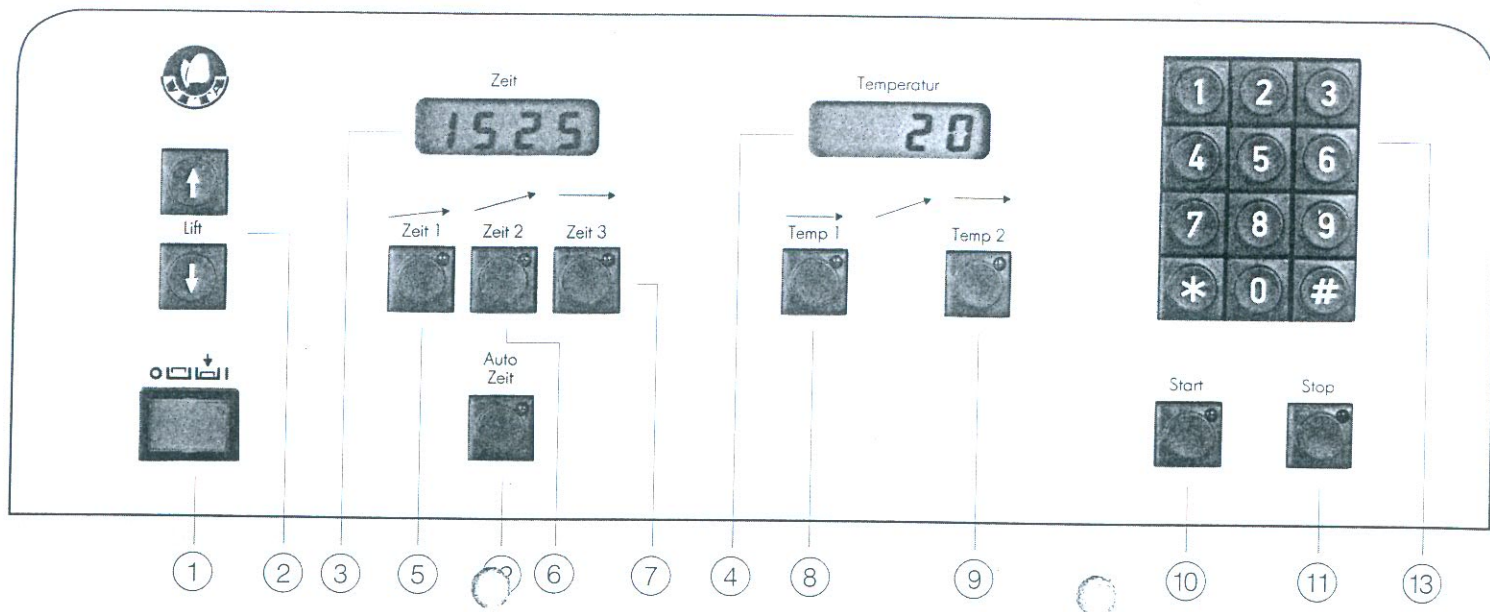

### Codes d'erreurs

- E01 Programmation incorrecte de la durée 1
- E02 Programmation incorrecte de la durée 2
- E03 Programmation incorrecte de la durée 3
- E04 Programmation incorrecte de la température 1
- E05 Programmation incorrecte de la température 2
- E06 Programmation incorrecte de l'heure de mise en route automatique
- E07 Programmation incorrecte de l'heure
- E77 Platine défectueuse
- E99 Thermocouple défectueux

### Appel du compteur d'heures de fonctionnement

1. Mettre l'appareil en marche avec l'interrupteur ①.
2. Appuyer sur la touche verte du clavier ⑬ jusqu'à ce que les indicateurs lumineux affichent des tirets.
3. Appuyer en continu sur la touche "4" du clavier ⑬, l'indicateur ③ mentionne le nombre d'heures de fonctionnement du four. Après avoir relâché la touche, l'indicateur mentionne de nouveau le n° de programme.

Table de cuisson

Cuisson	Progr.	Durée 1	Durée 2	Durée 3	Temp. 1	Temp. 2
Frittage	1	6:00	2:00	2:00	120	1120
Cuisson d'infiltration 1 élément	2	0:00	0:30	4:00	200	1100
Cuisson d'infiltration pour les bridges	3	0:00	0:30	6:00	200	1100

### Codes d'erreurs / Table de cuisson